



Nuestro toque
más suave.

A AirTouch™ N30i da ResMed



Viva la vida en
alta resolución



AirTouch™
N30i

Conozca AirTouch™ N30i de ResMed

Presente a sus pacientes una máscara nasal con tubo en la parte superior de la cabeza, excepcionalmente confortable: AirTouch™ N30i de ResMed. La mas nueva almohadilla ComfiSoft™ combina el sellado fiable y la durabilidad de la silicona con el confort natural que la tela únicamente puede ofrecer. La almohadilla y la armazón flexible SpringFit™ se adaptan automáticamente al formato del rostro y de la nariz, diseñadas para ayudar a lograr adherencia al tratamiento.



Armazón SpringFit™ envuelta en tela

La armazón de silicona autoajustable es totalmente envuelta en material extremadamente suave, respirable, que absorbe la humedad. Es ligera, delicada para el rostro y mantiene la piel fresca¹.

Disponible en dos tamaños y diseñada para ajustarse fácilmente a distintos perfiles faciales y formatos de cabeza para un ajuste preciso desde la primera utilización.

Tecnología de sellado en tela y silicona

Desarrollada para maximizar el confort sin comprometer el rendimiento del sellado.

Almohadilla ComfiSoft™

La tela combinada a la silicona crea un sellado para la almohadilla suave, respirable y que absorbe la humedad.

Diseño nasal anatómico

Disponible en 3 tamaños, cubriendo 97% de la banda de ajuste². El diseño curvado de adapta a la nariz del paciente para un sellado confortable y seguro por toda la noche.

El codo de liberación rápida


Permite que los pacientes desconecten y reconecten fácilmente la máscara al tubo.

Diseño con tubo en la parte superior


Mantiene la tubería fuera del camino para que los pacientes tengan libertad de dormir en posiciones distintas.

Arnés de fácil ajuste

El formato se ajusta confortablemente a la parte posterior de la cabeza ① con pestañas laterales ② ③ diseñadas para obtener el ajuste ideal.

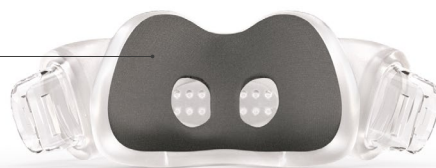

Parte posterior de la almohadilla

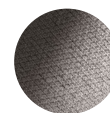

Almohadilla innovadora

La tela suave recubre casi todo el área de la nariz para máximo confort de la piel.



Parte anterior de la almohadilla

Ventilación difusa QuietAir™

Diseñada para ser más silenciosa que un susurro, minimizando el flujo de aire para el paciente y sus acompañantes.

Sistema de máscara completo

62300
62301
62310
62311
62312
62313
62314
62315

Almohadilla nasal anatómica
(SW, M, L)

Codo

Arnés

Armazón
(STD, SML)

Sistema de armazón (62316, 62317, 62318, 62319, 62320, 62321)

AirTouch™ N30i

Sistema de máscara completo

(incluye armazón de la máscara, almohadilla nasal e arnés)

Nome del producto	Model number
AirTouch™ N30i STD STPK AMER	62300
AirTouch™ N30i SML STPK AMER	62301
AirTouch™ N30i SYS – SW/STD	62310
AirTouch™ N30i SYS – M/STD	62311
AirTouch™ N30i SYS – L/STD	62312
AirTouch™ N30i SYS – SW/SML	62313
AirTouch™ N30i SYS – M/SML	62314
AirTouch™ N30i SYS – L/SML	62315

Almohadilla nasal

Nome del producto	Model number
AirTouch™ N30i Cushion – SW	62330
AirTouch™ N30i Cushion – M	62331
AirTouch™ N30i Cushion – L	62332

Sistema de armazón (incluye armazón de la máscara y almohadilla nasal)

Nome del producto	Model number
AirTouch™ N30i Frame SYS – SW/STD	62316
AirTouch™ N30i Frame SYS – M/STD	62317
AirTouch™ N30i Frame SYS – L/STD	62318
AirTouch™ N30i Frame SYS – SW/SML	62319
AirTouch™ N30i Frame SYS – M/SML	62320
AirTouch™ N30i Frame SYS – L/SML	62321

Arnés

Nome del producto	Model number
N30i/P30i Arnés	63814

Viva la vida en alta resolución





AirTouch™ **N30i**



Máscara nasal
anatómica

Como ajustar la AirTouch™ N30i




Empuje la armazón y el arnés por encima de la cabeza de manera que el codo se que de arriba y el arnés se posicione por detrás de la cabeza.



Inserte la almohadilla bajo la nariz. Apriete o afloje el arnés hasta que la almohadilla de encaje confortablemente.



Oprima los botones laterales del codo y suéltelo de la armazón.

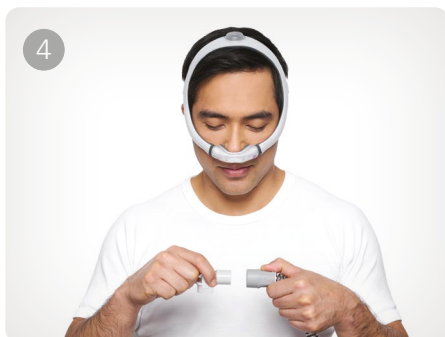

Conecte la tubería del equipo al codo.



Reconecte el codo a la armazón. La máscara está ahora lista para uso.



Si tiene pelo largo, úsalo por encima del arnés para lograr el mejor ajuste.

Refer to the user guide for further instructions and complete labeling information, including indications, contraindications, warnings and precautions.

Pruebe la AirTouch™ N30i de ResMed hoy.

Con una armazón flexible envuelta en tela y nuestra innovadora almohadilla nasal ComfiSoft™, la nueva máscara nasal AirTouch™ N30i de ResMed está diseñada para propiciar una experiencia de sueño más natural. Ofrecida por la marca de soluciones para apnea del sueño más fiable entre médicos especialistas en sueño³.



¹ En estudio externo de 90 días conducido por ResMed con AirTouch™ N30i con 120 pacientes en terapia con CPAP para AOS (≥ 6 meses) usando la AirFit™ N30i o Dreamweaver nasal, 94,4% de los pacientes consultados han preferido la sensación del material de tela de AirTouch™ N30i en su rostro en comparación con la silicona de sus máscaras. El estudio ha sido conducido en 2 ubicaciones en los EE. UU. de 31 de mayo hasta 6 de noviembre, 2023.

² AirTouch™ N30i de ResMed ha demostrado una banda de ajuste de 97,2% con base en el sellado y confort aceptables tras 90 días de uso. (consulte RMO_WSN_73).

³ Estudio de ResMed con médicos certificados en sueño en los EE. UU. Estudio conducido de 12 de agosto a 6 de septiembre de 2022. n=200